

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://siemensmed.nt-rt.ru> || [sdi@nt-rt.ru](mailto:sdi@nt-rt.ru)

## Тест-полоски CLINITEK Microalbumin 2



С помощью тест-полосок CLINITEK® Microalbumin 2 можно получить результаты содержания альбумина, креатинина и отношения альбумина к креатинину за одну минуту. Продукт CLINITEK® Microalbumin используется для исследования микроальбуминурии у пациентов с диабетом или гипертензией с целью обнаружения болезни почек на ранней стадии. Тест-полоски предназначены для применения на анализаторах CLINITEK Status®.

- Результаты измерения альбумина, креатинина и отношения альбумина к креатинину позволяют идентифицировать клинически значимую микроальбуминурию;
- Повышенная чувствительность к альбумину в соответствии с рекомендациями Американской ассоциации диабетологов (ADA): чувствительность не более 2.0 мг/дл;
- При использовании на анализаторах CLINITEK Status результаты интерпретируются с учетом различных

концентраций мочи, что исключает необходимость в сборе и измерении суточной мочи.

## • **Особенности**

- Диагностические Тест-полоски CLINITEK® Microalbumin 2 облегчают процесс диагностического обследования пациентов с диабетом. Благодаря тому, что в ходе определения микроальбуминурии можно обнаружить заболевание почек на ранней стадии, врачи могут раньше начать лечение. Тест-полоски с реагентом CLINITEK Microalbumin 2 позволяют обнаружить повышенные концентрации альбумина раньше, с большей точностью и большей специфичностью, чем продукты, разработанные для определения общего белка.<sup>1</sup>
- 
- Согласно Американской ассоциации диabetологов «Ежегодное обследование для определения микроальбуминурии позволяет идентифицировать пациентов с нефропатией на самой ранней стадии».<sup>1</sup>
- 
- С помощью тест-полосок с реагентом CLINITEK Microalbumin 2 могут быть получены полуколичественные результаты с выдачей отчета в печатной форме на анализаторах CLINITEK Status®, что делает их идеальным инструментом для проведения диагностики у постели пациента. Анализ образцов пациентов можно проводить сразу после сбора в кабинете врача, клинике или во время посещения больницы, а не отправлять их в лабораторию и ждать результатов. Эти полоски также удобны для исследования образцов мочи без необходимости сбора в определенное время.
- 

## **Анализ**

### **Имеющиеся в продаже тесты:**

Альбумин

Креатинин

Результаты отношения альбумина к креатинину (А:С)

## Технические характеристики


### Краткое справочное руководство к анализатору CLINITEK Status+



Zoom


#### Начало работы

- Включите анализатор CLINITEK Status®+;
- Поверните вкладыш рабочей панели таким образом, чтобы держатель тест-полосок смотрел вверх;
- Проверьте, чтобы поверхности панели для проведения исследования и вкладыша были чистыми.

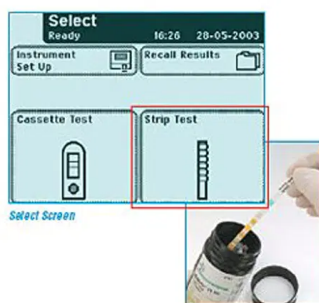

Zoom

- Когда появится экран выбора «Select», нажмите кнопку на экране Strip Test (тест-полоска);
- Чтобы начать анализ, извлеките тест-полоску с реагентом из флакона;
- Сразу после этого закройте флакон крышкой;
- Прочитайте этапы 3 и 4, после чего продолжайте с этапа 3.

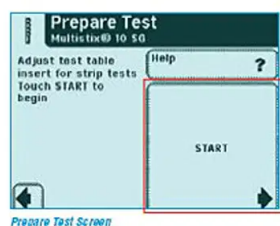


## Zoom

- Нажмите кнопку START на экране подготовки теста «Prepare Test»;
- Через 8 секунд выполните этап 4.



## Zoom

- Погрузите полоску (1) в образец мочи, смочив все индикаторные подушечки;
- Сразу же выньте полоску из мочи;
- Вынимая полоску из контейнера для образцов, слегка прижимайте ее к стенке контейнера (2).

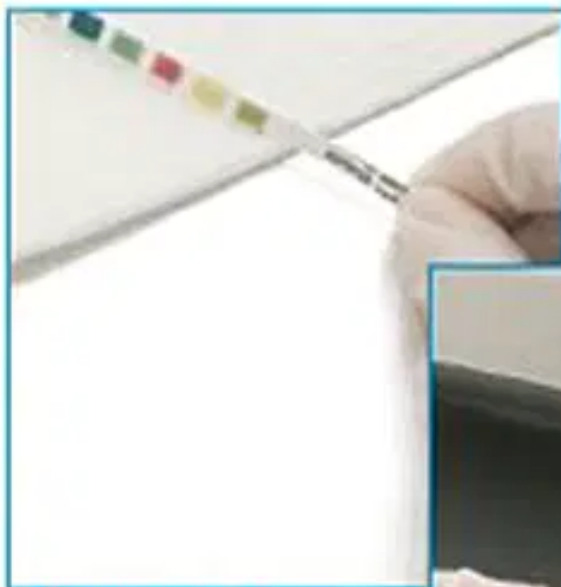


**③ Blot edge**



**④ Place**

## Zoom

- Промокните (3), прикоснувшись краем полоски к бумажному полотенцу, чтобы удалить избыток мочи;
- Установите полоску с реагентом (4) в канал рабочей панели так, чтобы тест-подушечки смотрели вверх;
- Вставьте полоску в канал до конца. Не прикасайтесь к тест-подушечкам на тест-полоске.

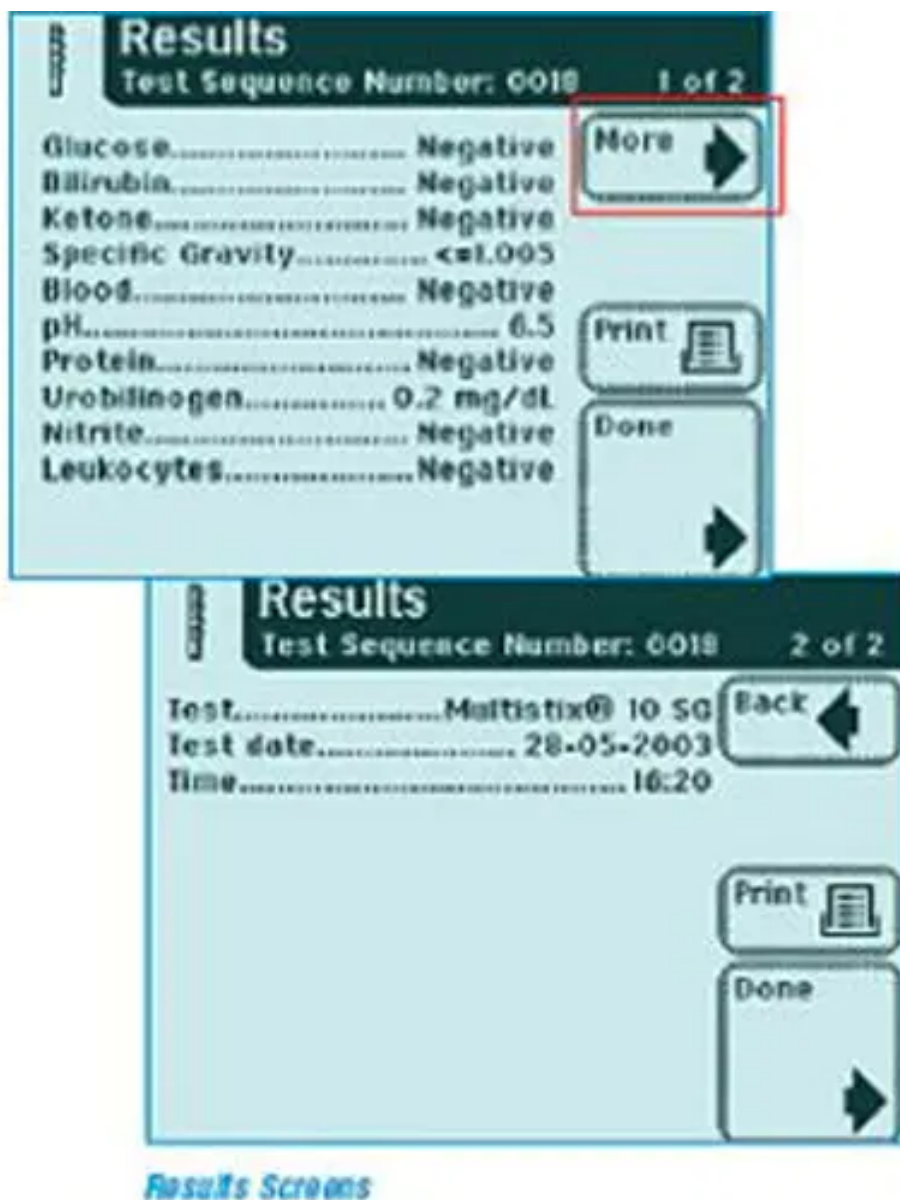

## Zoom

- Через 8 секунд рабочая панель автоматически войдет в анализатор;
- После завершения анализа на дисплее появится экран «Results» («Результаты»);
- Чтобы увидеть второй экран «Results», нажмите «More» («Больше»).

## После завершения теста

- Утилизировать тест-полоску с реагентом;

- При необходимости, протереть вкладыш рабочей панели влажной тканью, чтобы убрать остатки мочи;
- Запишите или выведите результаты на печать и составьте отчет с кодом пациента в соответствии с вашими лабораторными нормативами.

Алматы (7273)495-231  
 Ангaрск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47